



### Warning

For in vitro use only

Do not pipette by mouth

Do not use reagents beyond the expiry date.

### References

1. Bessey OAH et al. J Biol Chem 1946;164:321.
2. Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie.  
StandardMethode zur Bestimmung der Aktivität der alkalischen  
Phosphatase. Z klin Chem u klin Biochem 1972;10:191.
3. Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of  
Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem  
1986;32:470-474.
4. Greiling H, Gressner AM (Hrsg.). Lehrbuch der Klinischen Chemie und  
Pathobiochemie, 3rd . Stuttgart/New York: Schattauer Verlag, 1995.
5. Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. List of Analytes  
Preanalytical Variables. Broschüre in: Samples: From the Patient to the  
Laboratory. Darmstadt: GIT Verlag,1996.
6. Hausamen TU et al. Clin Chim Acta 1967;15:241.
7. Rosalki SB, Foo AY, Burlina A et al. Multicenter Evaluation of Iso ALP  
Test Kit for Measurement of Bone Alkaline Phosphatase Activity in Serum  
and Plasma. Clin Chem 1993;39:648-652.